




# Guida rapida


TASKA HandGen1, Gen2  
Media (7¼") & Grande (8¼") V2.3

 **TASKA**™

# 1. Verifica

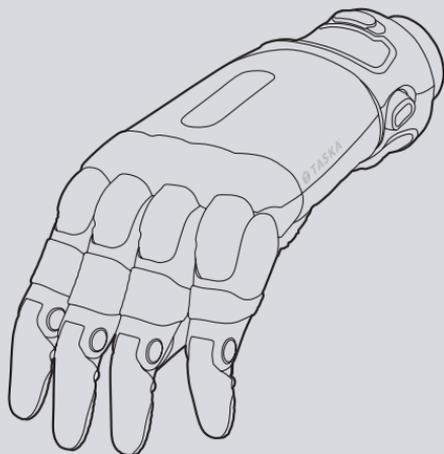


TASKA HandGen2\*

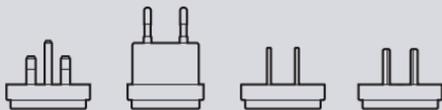

Kit di spine universali



Adattatore per Bluetooth

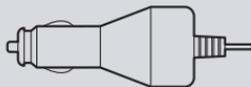

Caricabatterie per auto



Caricabatterie di rete

**TASKA™**

do more

\* L'immagine mostra l'attacco per polso a scollegamento rapido (QDW).  
Gli elementi mostrati non sono in scala.

## 2. Download


### Software per utenti

Per accedere alla pagina di download per il software TASKA per utenti, digitare il seguente link:

**[taskaprosthetics.com/support](https://taskaprosthetics.com/support)**

È inoltre disponibile un'app gratuita per dispositivi mobili, che permette di configurare i pulsanti e le serie di prese EMG nonché di risolvere i problemi relativi ai sensori.

Per il download, visitare l'app store sul dispositivo e cercare TASKA Prosthetics.

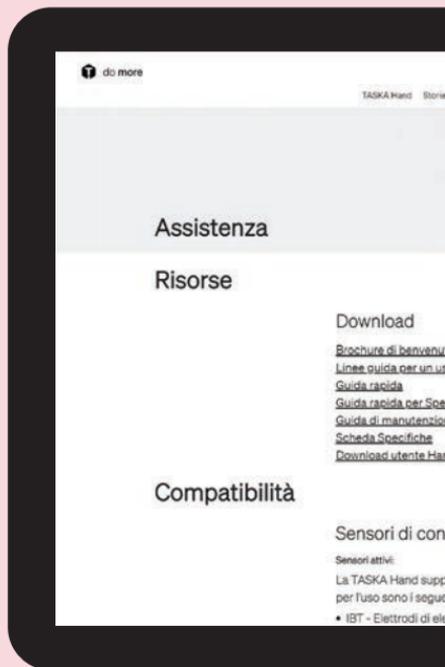

# 3. Controllo

## Pulsanti di ciclo prese

Per ulteriori informazioni sui pulsanti di ciclo prese, visitare il sito [taskaprosthetics.com](http://taskaprosthetics.com)

### Spia della batteria

La spia lampeggia quando la batteria è quasi esaurita.

### Spia di errore

La spia lampeggia in caso di errore o guasto. Riavviare la mano. Se l'inconveniente si verifica spesso, contattare lo specialista.

### Pulsante Home

Permette di selezionare le 3 prese principali. Premere per passare dalla presa flexi-tool alla presa generale e viceversa. Tenere premuto per la presa a pinza.

### Spia EMG

Lampeggia quando gli input sono limitati (trigger di presa o tutti i sensori).

### Spia Bluetooth

È accesa quando il Bluetooth è abilitato.

### Spia pulsante Mano

Lampeggia brevemente quando la modalità di limitazione è attivata.

### Pulsante Mano

Premere per alternare varie prese (fino a 5) tra quelle scelte. Tenere premuto per attivare / disattivare il Bluetooth.

### Pulsante EMG

Modificare la funzionalità di questo pulsante, utilizzando il software HandCal, per limitare i trigger di presa o gli input a tutti i sensori.

Tenere premuto per attivare / disattivare i suoni.



## 4. Collegare (TASKA HandGen1)

### Collegare la mano


Se la TASKA Hand è stata fornita con un polso QDW, è facile attaccare e rimuovere la mano.

#### Per attaccare la mano:

1. Allineare la connessione del polso della mano con l'invaso.
2. Spingerli insieme. Si sentirà un clic quando la mano si è bloccata sull'invaso.

#### Per togliere la mano:

1. Ruotare la mano e l'invaso in direzioni opposte ed estrarre delicatamente la mano dall'invaso.
2. Quando la rotazione ha raggiunto il punto corretto, la mano si libererà dall'invaso.

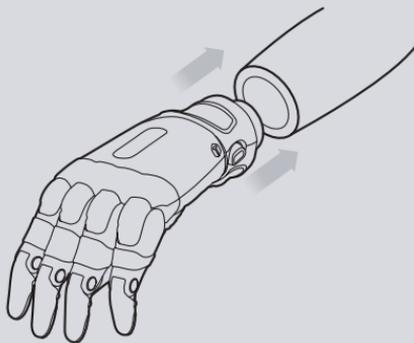

Collegare il polso QDW.

### Polso a basso profilo


Se la TASKA Hand è stata fornita con un polso a basso profilo (LP), la mano può essere installata e rimossa esclusivamente da uno specialista specificamente formato. **Evitare qualsiasi tentativo di installare o rimuovere la mano da soli.**

## 4. Collegare (TASKA HandGen2)


### Collegare la mano

Se la TASKA Hand è stata fornita con un polso a scollegamento rapido (QDW), è semplice installarla e rimuoverla.

1. Inserire la mano nell'attacco sull'invaso.
2. Ruotare la mano di 45° verso il proprio corpo finché non scatta in posizione.
3. Verificare la corretta installazione ruotando la mano nell'altra direzione. Il polso dovrebbe ruotare normalmente (scattare) ed essere ben fissato.
4. La TASKA Hand è pronta all'uso.

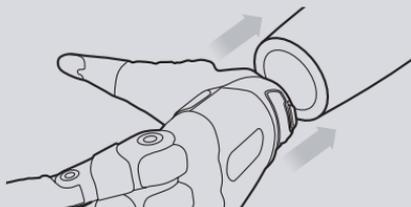

Inserire la mano nell'attacco del polso.

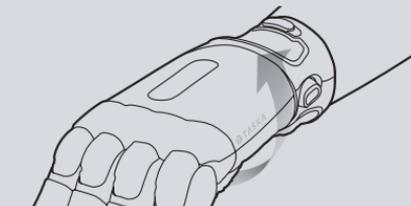

Rotazione e installazione della TASKA Hand.




Se la mano è equipaggiata con un anello di tenuta, pulire tale anello e la superficie sigillante sull'attacco del polso all'invaso con un panno morbido e inumidito, in modo da rimuovere l'eventuale sporcizia prima dell'installazione. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione del polso, consultare la Guida per un uso appropriato.

## (TASKA HandGen2 continua)

### Rimozione della mano


1. Tenere premuti entrambi i pulsanti di rilascio.
2. Tenendo premuti entrambi i pulsanti, ruotare la mano di 45° allontanandola dal corpo finché non si avverte una certa resistenza. Questa rotazione avverrà dolcemente e senza scatti udibili.
3. Rimuovere la mano.

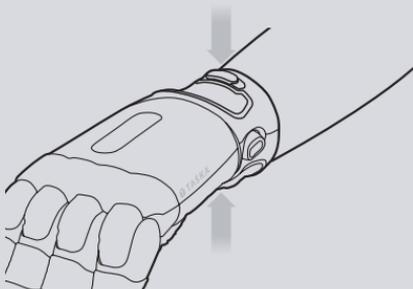

Tenere premuti entrambi i pulsanti di rilascio.

### Polso a basso profilo

Se la TASKA Hand è stata fornita con un polso a basso profilo (LP), la mano può essere installata e rimossa esclusivamente da uno specialista specificamente formato. **Evitare qualsiasi tentativo di installare o rimuovere la mano da soli.**

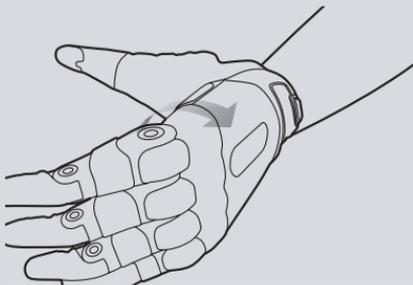

Rotazione e rimozione della TASKA Hand.

## 5. Alimentazione


---

### Accensione e spegnimento della mano

Sull'invaso è presente un pulsante che accende e spegne la TASKA Hand.

È necessario che la mano possa aprirsi completamente, prima di accenderla. Per garantire la miglior calibrazione possibile della mano, assicurarsi che non vi siano limitazioni al suo movimento.

Per accendere la mano, premere il pulsante una volta. Quando la mano si accende, due delle spie sul dorso della mano lampeggiano brevemente e le dita si apriranno quando la mano è pronta.

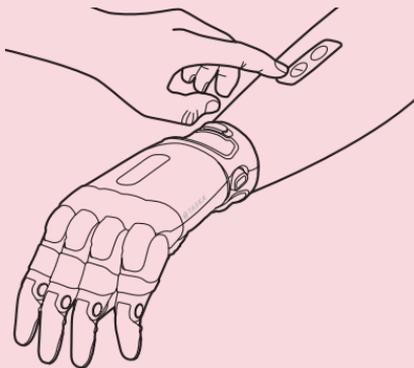

---

Accensione e spegnimento della TASKA Hand tramite il sistema d'alimentazione TASKA.



Se si utilizza la TASKA Hand con un gomito o con un altro sistema di alimentazione, per il funzionamento consultare il manuale d'uso corrispondente.


## 6. Carica

### Batteria in carica

Togliere la mano e l'invaso dall'arto residuo prima di caricare la mano. Il punto di ricarica è una presa magnetica accanto al pulsante di alimentazione.

#### Per caricare la mano:

1. Posizionare l'estremità magnetica del cavo di ricarica sulla parte superiore della presa di ricarica: si allineeranno automaticamente.
2. Collegare il caricabatterie ad una presa a muro (caricabatterie di rete), oppure ad una presa per accendisigari (caricabatterie per auto) che non superi i 12 V. Durante la ricarica, la spia del caricabatterie sarà di colore rosso. Una volta completata la ricarica, la spia diventerà di colore verde.

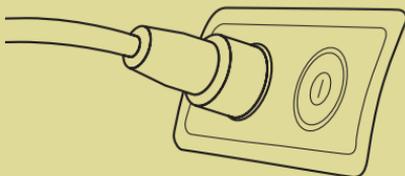

Collegare il cavo di ricarica alla presa magnetica di ricarica sull'interruttore di alimentazione.



**Utilizzare esclusivamente i caricabatterie forniti da TASKA per caricare le batterie TASKA.**

# 7. do more

## Risorse aggiuntive

Quando avrà acquisito più esperienza nell'uso della sua TASKA Hand, potrebbe voler esplorare ulteriori possibilità d'uso, e voler imparare come sfruttare al meglio le funzioni nelle attività quotidiane.

Offriamo una vasta gamma di risorse per aiutarla ad ottenere il massimo valore dalla sua TASKA Hand:

- Video didattici.
- Guide di allenamento graduale chiare e dettagliate.
- Aggiornamenti sui nostri social media. Ci può trovare su [@TaskaGlobal](#) e può entrare a far parte della comunità di TASKA.

- App per il suo dispositivo mobile, laptop o desktop per personalizzare il funzionamento delle mani.

Per supporto e consigli sull'uso di TASKA Hand, è necessario prima di tutto contattare lo specialista che ha lavorato con lei per adattare la mano ed aiutarla a familiarizzare con essa

Per ulteriore supporto o aiuto nell'uso di TASKA Hand, contatti lo specialista o mandi una email a [support@taskaprosthetics.com](mailto:support@taskaprosthetics.com)



Consultare la **Guida per un uso appropriato** per le linee guida dettagliate e complete sull'uso sicuro della TASKA Hand.



**TASKA Prosthetics**  
10 Nelson Street, Riccarton,  
Christchurch 8011, New Zealand.



**EMERGO EUROPE**  
Westervoortseijk 60,  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands